


### Anleitung zur Verstellung der Hörerkapseln am TDH-39

Mit dieser kurzen Beschreibung, möchten wir Ihnen eine Anleitung an die Hand geben, wie die Hörerkapseln am TDH-39 ohne Anstrengungen in der Höhe zu verstellen sind.

1. Durch seitlichen Druck auf die Bügel (1 & 2), diese zueinander zusammendrücken.
2. Durch das zusammendrücken der Bügel, kann Die Hörerkapsel ohne Anstrengung in der Führung (3) verschoben werden.
3. Hat die Hörerkapsel die gewünschte Position, einfach die Bügel wieder entspannen und die Kapsel ist in Ihrer Position fixiert.

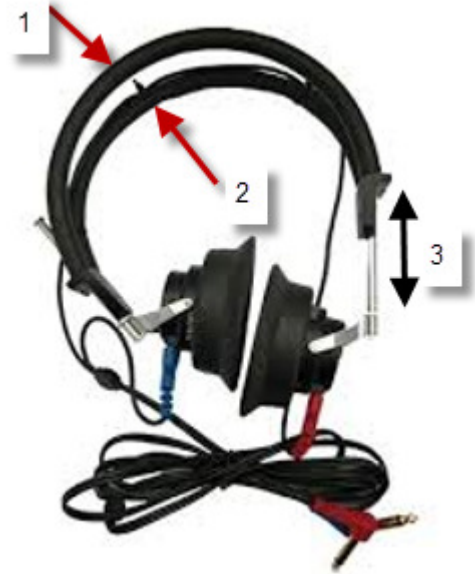

Tip: Beim Aufsetzen des Kopfhörers diesen in Höhe der Vorstellungen am Kopfband halten. Bitte nicht direkt an den Hörerkapseln festhalten und aufweiten. Dies kann dazu führen, dass die Verstellung aus den Führungen am Kopfband herausbricht.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Otometrics

| **Otometrics-Service** | T: +49 251 203 983 -9922 | F: +49 251 203 983 -996 | [otoservice.de@natus.com](mailto:otoservice.de@natus.com) |

| **GN Otometrics GmbH** | Service Deutschland | An der Kleimannbrücke 75 | D-48157 Münster | [www.otometrics.de](http://www.otometrics.de) |

**Kennen Sie schon unser Otometrics Anwender-Wiki?**

Unter [wiki.gnotometrics.biz](http://wiki.gnotometrics.biz) finden Sie viele Antworten auf Fragestellungen rund um unsere Produkte – einfach, schnell und unkompliziert.