


# OtosuiteV

## DBProperties Error

Bei der Installation von OtosuiteV im Netzwerk als Client kann es zu folgender Fehlermeldung kommen:



Hier kann helfen folgende Dateien zu ersetzen:

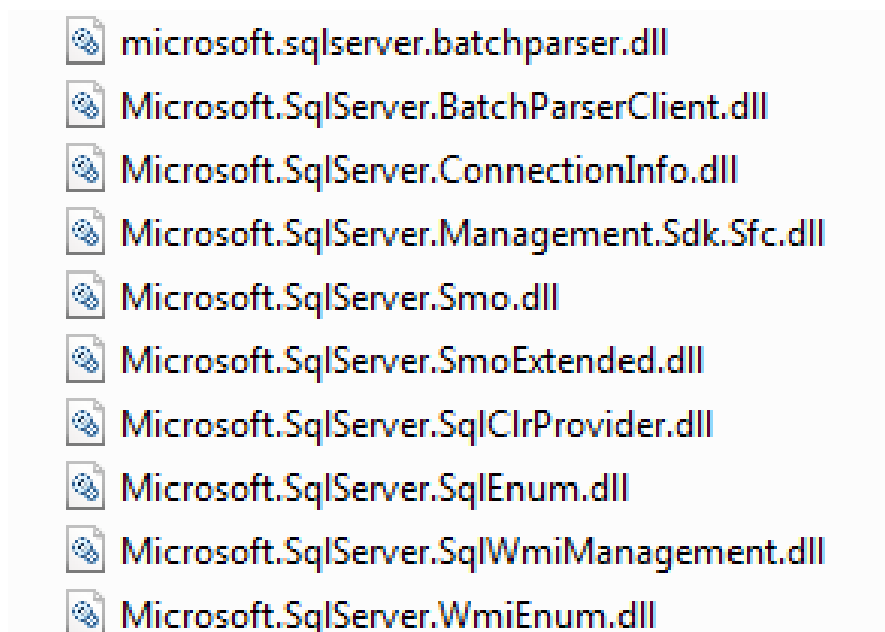

# OtosuiteV

## DBProperties Error

- Wechseln Sie in das Verzeichnis:  
C:\Program Files (x86)\GN Otometrics\OTOSuite Vestibular
- Schneiden Sie die auf Seite 1 gezeigten Dateien aus und sichern dies an einem anderen Ort.
- Wechseln Sie in das Verzeichnis:  
C:\ProgramData\Otometrics\OTOSuiteV\Support
- Wählen Sie dort dieselbe Auswahl an Dateien und kopieren diese in das Verzeichnis:  
C:\Program Files (x86)\GN Otometrics\OTOSuite Vestibular
- Starten Sie die Software OtosuiteV  
Wenn der Fehler hierdurch behoben ist, dann löschen Sie die zuvor gesicherten Dateien.

## Copyright Hinweise

Die Inhalte dieses Handbuches und/oder des Programmes unterliegen dem Copyright und Urhebergesetz und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die GN Otometrics GmbH weder ganz, noch auszugsweise veröffentlicht, oder in jeglicher Form versendet, abgespeichert oder vervielfältigt werden.

Copyright© 2017, GN Otometrics GmbH

Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in diesem Handbuch basieren auf den aktuellen Produktinformationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. GN Otometrics A/S & GN Otometrics GmbH haben das Recht Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Technischer Support

E-Mail: [service-de@otometrics.com](mailto:service-de@otometrics.com) Tel: +49 (0) 251 203 983 9922

Wichtig!

Für umfassende Informationen bezüglich der Sicherheit im Umgang mit dem betreffenden Produkt lesen Sie bitte das entsprechende Benutzerhandbuch. Es enthält Informationen und Sicherheitshinweise, welche für einen sicheren Umgang mit dem Produkt benötigt werden.

Sie haben Interesse an einer Intensivschulung für sich und Ihr Team? Bei Fragen und Angebotswünschen kontaktieren Sie bitte:

Günter Engelhard, Produktspezialist / Trainer HNO  
E-Mail: [gengelhard@otometrics.com](mailto:gengelhard@otometrics.com)  
Mobil: +49 (0) 172 83 27 811

Julia Klenovits, Seminarorganisation  
E-Mail: [fortbildung@otometrics.com](mailto:fortbildung@otometrics.com)  
Tel: +49 (0) 251 203 983 916

Weitere Workshoptermine finden Sie unter:

<http://www.otometrics.com/de-DE/wissen/seminare>



[facebook.com/Otometrics.HNO.de](https://facebook.com/Otometrics.HNO.de)



[youtube.com/otometricsTV](https://youtube.com/otometricsTV)

Otometrics, Deutschland. Tel.:0251 203 983-0. Fax: 0251 203 983 999  
[www.otometrics.de](http://www.otometrics.de) [info-de@otometrics.com](mailto:info-de@otometrics.com)